

## SURFANIOS PREMIUM

<b>INDICATIONS*</b>	Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériels médical. Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.
<b>COMPOSITION</b>	N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 51mg/g), chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25mg/g), excipients.
<b>PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES*</b>	Bactéries : EN 1040, EN 1276, EN 13727 : 5 minutes BMR (EN 1276) : 5 minutes EN 13697 : 30 minutes BMR (EN 13697) : 15 minutes Mycobactéries : M. terrae (EN 14348, EN 14563) : 30 minutes/0.5% M. terrae (EN 14348, EN 14563) : 60 minutes/0.25% Levures : EN 1275, EN 1650 : 15 minutes EN 13697 : 30 minutes Moisissures : EN 1275 : 15 minutes EN 13697 : 30 minutes EN 1650 120 minutes Virus: Selon EN 14476 ; HIV-1, PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle HCV) et Herpès virus : 5 minutes Vacciniavirus : 60 minutes
<b>MODE D'EMPLOI</b>	Remplir un seau de lavage avec 8 litres d'eau. Dilution à 0,25% : Verser une dose de 20 ml de SURFANIOS PREMIUM dans le seau de lavage. Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en respectant le schéma de nettoyage : du fond vers la sortie. Ne pas rincer les surfaces. Changer de franges autant de fois que nécessaire. Mettre la frange sale dans le récipient prévu à cet effet. Après le nettoyage de chaque secteur, changer la frange, renouveler la solution de lavage.
<b>PRECAUTIONS D'EMPLOI*</b>	Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

\* Les mentions obligatoires sont annotées d'un astérisque, le renvoi à ces mentions peut se faire en fin de catalogue ou à une note en bas de page reprise en petits caractères lisibles.